

ALGORITMO MINIMO DI PROVA

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

VSOP 2

Emesso da Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Centre for Infections



UK Clinical Virology Network

Association of Medical Microbiologists
Association of Medical Microbiologists



GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Pagina 1 di 7

Riferimento no: VSOP 2i5

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

Email: standards@hpa.org.uk

STATO DEI METODI NAZIONALI STANDARD

I Metodi Nazionali Standard, che includono le procedure operative standard (POS) algoritmi e linee guida, promuovono l'adozione di elevati livelli di qualità, contribuendo ad assicurare la possibilità di confronto delle informazioni diagnostiche ottenute in laboratori diversi. Ciò consente la standardizzazione della sorveglianza sostenuta dalla ricerca, sviluppo e verifica, promuovendo nello stesso tempo la salute pubblica e la fiducia del paziente nelle proprie strutture sanitarie. I metodi sono ben referenziati e rappresentano un buon standard minimo per la microbiologia clinica e per la salute pubblica. Comunque, utilizzando i Metodi Nazionali Standard, i laboratori dovranno tenere in considerazione le esigenze locali e potranno intraprendere ricerche aggiuntive. I metodi forniscono inoltre un punto di riferimento per un loro ulteriore sviluppo.

I Metodi Nazionali Standard sono stati sviluppati, revisionati ed aggiornati con una procedura aperta di consenso ove le opinioni di tutti i partecipanti sono state tenute in adeguata considerazione ed i documenti elaborati riflettono il consenso della maggior parte degli stessi.

I rappresentanti di alcune organizzazioni professionali, incluse quelle il cui logo appare sulla prima pagina, sono membri dei gruppi di lavoro che sviluppano i Metodi Nazionali Standard. L'inclusione del logo di una organizzazione nella prima pagina implica sostegno agli obiettivi ed al processo di preparazione dei metodi standard. I componenti di queste organizzazioni scientifiche hanno partecipato allo sviluppo dei Metodi Nazionali Standard ma le loro opinioni personali non rispecchiano necessariamente quelle dell'organizzazione di cui sono membri. L'elenco attuale delle organizzazioni professionali partecipanti può essere ottenuto tramite e-mail all'indirizzo standards@hpa.org.uk.

Le prestazioni dei metodi standard sono condizionate dalla qualità di reagenti, strumentazione, procedure commerciali o prove messe a punto in loco. I laboratori dovrebbero assicurare che queste siano state validate e dimostrate idonee allo scopo prefissato. Devono essere adottate procedure di controllo di qualità interno ed esterno.

Nonostante siano state osservate le più scrupolose attenzioni nella preparazione di questa pubblicazione, la Health Protection Agency o qualsiasi organizzazione di sostegno non può essere ritenuta responsabile dell'accuratezza o dell'utilizzo o di qualsiasi conseguenza derivante dall'uso o da modifiche delle informazioni contenute in questo documento. Queste procedure sono intese solamente come una risorsa generale per i professionisti che esercitano in questo settore, operanti nel Regno Unito, pertanto si dovrà ricorrere ad altri consulenti quando ritenuto necessario. Se si apportano modifiche a questa pubblicazione, si deve porre in evidenza dove sono state apportate modifiche al documento originale. La Health Protection Agency (HPA) dovrà essere informata in ogni circostanza.

La HPA è una organizzazione indipendente che ha lo scopo di proteggere la salute della popolazione. Ad essa confluiscono esperienze professionali già appartenenti ad organizzazioni ufficiali. Maggiori informazioni riferibili alla HPA possono essere ottenute al sito www.hpa.org.uk

La HPA è un'organizzazione che mira ad essere completamente in accordo con le direttive Caldicott. Ciò significa prendere ogni possibile precauzione per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sui pazienti e di garantire che le informazioni relative agli stessi siano mantenute in condizioni di sicurezza¹.

Maggiori dettagli possono essere ottenuti dal sito web www.evaluations-standards.org.uk. Contributi allo sviluppo dei documenti possono essere forniti contattando l'indirizzo standards@hpa.org.uk.

Per cortesia prendere nota che la bibliografia è attualmente formattata con il software Reference Manager. Se si modifica o si cancella il testo senza avere installato nel computer il Reference Manager, la bibliografia non sarà aggiornata automaticamente.

Riferimento suggerito per questo documento:

Health Protection Agency (2007). *Gastroenteritis: Sporadic cases*. National Standard Method VSOP 2 Emissione 5. http://www.hpa-standardmethods.org.uk/pdf_sops.asp

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Pagina 2 di 7

Riferimento no: VSOP 2i5

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

Email: standards@hpa.org.uk

INDICE

STATO DEI METODI NAZIONALI STANDARD	2
INDICE	3
PROCEDURA DI MODIFICA	4
GASTROENTERITE: CASI SPORADICI	5
RINGRAZIAMENTI E CONTATTI	6
BIBLIOGRAFIA	7

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Pagina 3 di 7

Riferimento no: VSOP 2i5

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

Email: standards@hpa.org.uk

PROCEDURA DI MODIFICA

Documento di riferimento controllato	VSOP 2
Titolo del documento controllato	Gastroenterite: Casi sporadici

Ciascun Metodo Nazionale Standard possiede una registrazione separata con le modifiche. Le modifiche di questa revisione sono riportate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la standards@hpa.org.uk.

Qualora vi sia una revisione di pagine o vengano emesse pagine nuove il proprietario di ciascun documento controllato dovrebbe aggiornare la copia in laboratorio

Modifica Numero/ Data	Emissione no. Scartata	Inserita Emissione no.	Pagina	Sessione(i) interessate	Modifica
5/ 10.08.05	4.1	5	Tutte 5	Tutte Diagramma di flusso	Documento inserito in formato standard Aggiornato in funzione della procedura attuale

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Pagina 4 di 7


Riferimento no: VSOP 2i5

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

Email: standards@hpa.org.uk

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

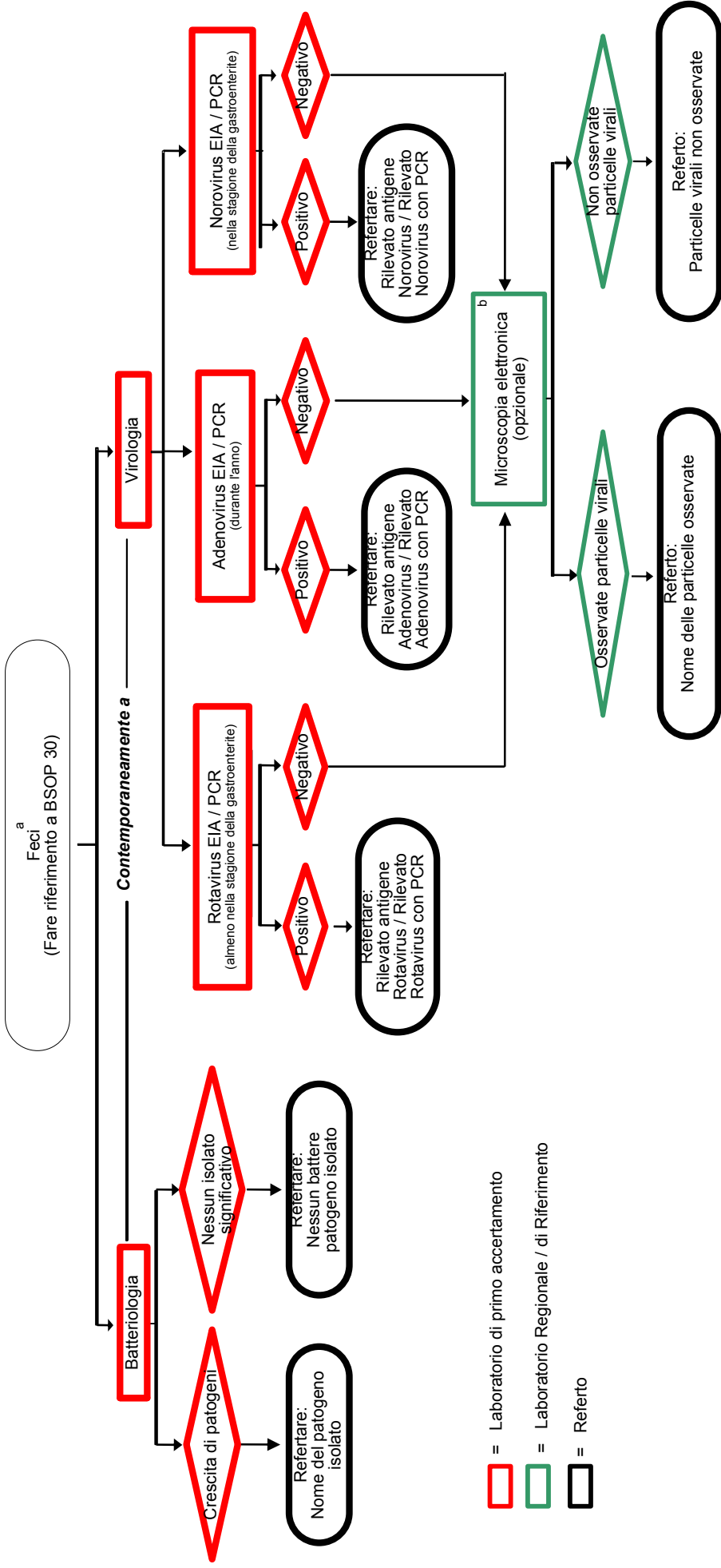

a. Se non specificamente richiesto, devono essere ricercati virus solo in campioni fecali raccolti da bambini di età <5 anni, anziani >60 anni, addebi alla produzione di alimenti e pazienti immunodepressi. Campioni fecali da pazienti ospedalizzati da non più di 3 giorni non devono essere indagati con EIA per rotavirus se non nelle seguenti condizioni:

- pazienti ricoverati che manifestano diarrea nei primi tre giorni di ricovero
- pazienti con diarrea di tipo nosocomiale solo nelle seguenti condizioni:
 - età di 65 anni o superiore con malattia pre-esistente che provoca alterazioni permanenti nella funzione dell'apparato
 - pazienti immunodepressi devono essere indagati con EIA per rotavirus ed adenovirus, Norovirus con PCR e ME
 - pazienti con neutropenia
 - sospette epidemie nosocomiali

b. sospette manifestazioni di infezioni enteriche non diarroiche
Per ragioni di costo, l'uso della ME deve essere ristretto al 10- 20% dei campioni idonei ricevuti dal territorio della unità di ME, questi sono comunque sufficienti a soddisfare le richieste della sorveglianza epidemiologica. In alcune circostanze possono essere utilizzate anche le PCR (ad esempio per Astrovirus)

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory

Pagina 5 di 7

Riferimento no.: VSOP 215

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

E-mail: standards@hpa.org.uk

RINGRAZIAMENTI E CONTATTI

Questo Metodo Nazionale Standard è stato sviluppato, revisionato e controllato dal National Standard Methods Working Group for Clinical Virology (http://www.hpastandardmethods.org.uk/wg_water.asp). Si ringraziano per la collaborazione i numerosi operatori dei laboratori di virologia e le organizzazioni specialistiche che hanno fornito informazioni e commenti durante lo sviluppo di questo documento ed il Redattore Medico per la revisione finale.

I Metodi Nazionali Standard sono emessi dalla Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory, Centre for Infections, Health Protection Agency London.

Per ulteriori informazioni prendere contatti con:

Standards Unit
Evaluations and Standards Laboratory
Centre for Infections
Health Protection Agency
Colindale
London
NW9 5EQ
E-mail: standards@hpa.org.uk

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Pagina 6 di 7

Riferimento no: VSOP 2i5

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

Email: standards@hpa.org.uk

BIBLIOGRAFIA

1. Department of Health NHS Executive: The Caldicott Committee. Report on the review of patient-identifiable information. London. December 1997.

GASTROENTERITE: CASI SPORADICI

Revisione no.5 Data di revisione 27.07.07 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory
Pagina 7 di 7

Riferimento no: VSOP 2i5

Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency

www.evaluations-standards.org.uk

Email: standards@hpa.org.uk